

智能戒指 使用说明书



【适配平台要求】



Android 8.0



IOS 14 及以上



APP支持BT5.0

【产品外观功能说明】

心率传感器



充电接收区域

佩戴提示：将智能戒指佩戴至手指上，建议佩戴的松紧度要合适，心率传感器的一侧朝手掌内侧。

PINEEON®

【戒指功能介绍】



- 1、蓝牙连接：蓝牙连接时绿灯闪烁三次（间隔1秒），亮灯时长为50MS。
- 2、开机：戒指充满电后，断开电源，自动开机。
- 3、关机：电量低于5%时自动关机。
- 4、低电量：低电时每间隔一分钟闪烁两次红灯，亮灯时长为50MS。
- 5、OTA升级：支持APP控制设备OTA。
- 6、心率测量：默认1小时测量一次，可在APP设置手动测量。
- 7、血压测量：默认1小时测量一次，可在APP设置手动测量。
- 8、血氧测量：默认1小时测量一次，可在APP设置手动测量。
- 9、睡眠测量：检测时间段区间为22:00-08:00。
- 10、运动测量：卡路里、步数、里程，运动系信息全天累加、每天零时自动清零。
- 11、历史数据保存时长：七天滚动保存

【APP连接方式】



乐动健康生活

(乐动健康生活允许使用手机应用功能)

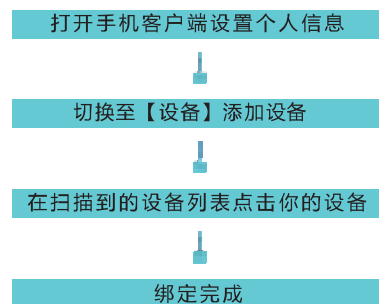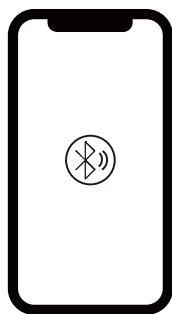

- 1、扫描上方的二维码，或者在安卓应用商店/APP Store搜索“乐动健康生活”下载并安装。
- 2、使用之前先将智能戒指充电进行激活。
- 3、充电激活之后打开并进入“乐动健康生活”APP,根据APP连接向导搜索设备，选择搜索列表中的“Smart Ring”进行配对使用。

PINEEON®

【充电方式】

充电需要使用出厂配置的底座充电线，将智能戒指放置底座上，充电时红光常亮，充满绿灯常亮。

【APP功能介绍】

- 1、首页、运动页、设备页、个人信息页。
- 2、计步：根据用户佩戴戒指每天行走的步数、路程以及消耗卡路里的数据绘制成图表，提供给用户每天/每周/每月所需要的计步数据。
- 3、心率模块：设备端每次测量数据会保存在APP心率历史中，方便用户查看详情。
- 4、血压模块：设备端每次测量数据会保存在APP血压历史中，方便用户查看详情。
- 5、血氧模块：设备端每次测量数据会保存在APP血氧历史中，方便用户查看详情。
- 6、睡眠模块：以图表的形式记录每天/每周/每月的睡眠信息数据，通过戒指数据并计算出每天的睡眠质量和睡眠时长。

【基本参数】

蓝 牙	Bluetooth5.0
电池类型	聚合物电池
电池容量	18mAh
充电时间	一个小时
充电方式	座充
包 装	智能戒指+磁吸充电线+产品说明书

PINEEON®

【注意事项】

1、若出现产品质量问题或者对产品使用有不明白的地方，请直接邮件联系我们，我们将快速进行处理。

2、本产品的测量结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依此测量结果自我诊断及治疗。

3、本公司保留不做任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改的权利，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况。

4、根据美国联邦通信委员会规则第15部分的规定，该设备经过测试，符合B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。该设备产生、使用并可辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定的安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可以通过关闭和打开设备来确定，则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：

--重新定向或重新定位接收天线。

--增加设备和接收器之间的间距。

--将设备连接到与接收器不同的电路上的插座

PINEEON®